

NÁVOD K POUŽITÍ Med-Cover Oral Care Sticks

Med-Cover Oral Care Sticks jsou určeny pro péči o ústní dutinu a její čištění. Díky obsaženému glycerinu hydratují rty. Díky citronové příchuti pomáhají osvěžit dech.

Návod k použití:

1. Jedna strana úst (pravá horní čelist), od horních zadních zubů ke středové čáře čelisti,
2. Druhá strana úst (levá horní čelist), od horních zadních zubů ke středové čáře čelisti,
3. Jedna strana úst (pravá dolní čelist), od dolních zadních zubů ke středové čáře čelisti,
4. Druhá strana úst (levá dolní čelist), od dolních zadních zubů, ke středové čáře brady,
6. Vnitřní strana úst v pořadí uvedeném výše,
7. Sliznice pravé tváře,
8. Sliznice levé tváře,
9. Patro,
10. Na jazyku

Pro každou oblast použijte novou tyčinku. V případě potřeby lze na jednu oblast použít více tyčinek. Tyčinka je vhodná pro každodenní použití.

Upozornění a první pomoc:

Poškozené obaly produktů se nepoužívají. Je vhodný pro každodenní použití. Výrobek je jednorázový a nelze jej používat opakovaně. Zabraňte kontaktu s očima a jejich zasažení. V případě zasažení očí důkladně vypláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí, v pokojové teplotě a nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Symbody a zkratky:

Symbol	Význam	Vysvětlení a odůvodnění
	Nepoužívejte opakovaně.	Používá se k prohlášení, že zařízení nebylo použito dvakrát.
	Datum z výroby	Označuje datum výroby zdravotnického prostředku

	Chraňte před slunečním zářením	Chraňte před slunečním zářením
	Uchovávejte v suchu	Označuje zdravotnický prostředek, který musí být chráněn před vlhkostí.
	Šarže	Určuje kód šarže výrobce, aby bylo možné identifikovat šarži.
	Datum expirace	Zobrazuje datum spotřeby zdravotnického prostředku.
	Výrobce	Tento symbol je doprovázen názvem a adresou výrobce (tj. osoby uvádějící zdravotnický prostředek na trh) vedle tohoto symbolu.
	Teplotní limit	Označuje přijatelný rozsah skladovacích teplot pro produkt. Produkt by měl být skladován při teplotě 5 °C až 40 °C, aby byla zachována funkčnost a bezpečnost produktu.
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozený	Označuje, že výrobek nesmí být používán, pokud je obal otevřený, roztržený nebo poškozený, protože by mohla být ohrožena celistvost a hygiena výrobku.
	Recyklovatelné (plast 7 – JINÉ)	Označuje typ plastového materiálu použitého v obalu. Likvidace by měla být provedena v souladu s místními předpisy pro recyklaci..
	Správná likvidace	Označuje, že výrobek a jeho obal by měly být zlikvidovány zodpovědně v souladu s místními předpisy o odpadech..
	Referenční číslo	Uvádí referenční číslo výrobce, aby bylo možné zdravotnický prostředek identifikovat.