

# Barrier Cream Návod k použití

**Název produktu:** Barrier Cream – Ochranný krém

**Obchodní název:** Med-Cover Bariyer Krem / Med – Cover Barrier Cream

**Účel použití:**

Pomáhá chránit neporušenou pokožku před dermatitidou, která je způsobena inkontinencí pacientů s omezenou pohyblivostí, upoutaných na lůžko a pacientů se speciálními potřebami, jako jsou pacienti na jednotkách intenzivní péče.

**Použití:**

Aplikujte přímo na místo, které chcete aplikovat.

Otevřete víčko tuby. Aplikujte otřením na místo, které chcete aplikovat.

**Indikace:**

Med-Cover Barrier Cream pomáhá chránit integritu pokožky před poškozením, ke kterému může dojít močí a/nebo stolicí v perineální oblasti a mikroprostředí ran.

**Kontraindikace:**

Produkt nemá žádné kontraindikace.

**Cílová populace:**

Neexistuje žádná speciální populace pacientů.

**Fáze použití:**

Je připraven k přímému použití bez nutnosti míchání nebo ředění s jakoukoli látkou. Otevřete obal zespodu.

**Četnost použití:**

Je vhodný pro každodenní použití.

**Upozornění:**

- Nemíchejte s jinými produkty nebo chemikáliemi
- Používejte pouze neporušené a nepoškozené obaly.
- Nepoužívejte s látkami přecitlivělými na složky přípravku.
- K zevnímu použití.
- Nepoužívejte přípravky s poškozeným obalem.
- Nenechávejte víčko přípravku otevřené.
- Nevyžaduje oplachování a sušení.
- Použité přípravky a jejich obaly by měly být zlikvidovány jako zdravotnický odpad.
- Nepoužívejte u pacientů a/nebo uživatelů se známou přecitlivělostí na materiály/složky přípravku.
- Kojenci ve věku 0–6 měsíců, kojící nebo těhotné ženy by měly přípravek používat pod dohledem lékaře.
- Nesmí přijít do kontaktu s očima.
- Nesmí přijít do kontaktu s otevřenou ranou.
- Datum expirace a číslo šarže jsou napsány jako razítkovací značka na horní straně obalu. Prázdné obaly od použitých přípravků by měly být vyhozeny do plastových odpadkových košů.
- Před a po použití přípravku by neměly být používány žádné jiné čisticí tekutiny ani látky.
- Používá se zevně. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Použité přípravky by měly být zlikvidovány jako zdravotnický odpad.

# Barrier Cream Návod k použití

## Pokyny pro uživatele:

- Zkontrolujte obal výrobku, zda není poškozený nebo deformovaný.
- Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.
- Obal opatrně otevřete.
- Trvanlivost výrobku je stanovena na 2 roky (24 měsíců). Nepoužívejte prošlé výrobky.
- Po použití vyhoďte zbývající obsah s obalem do nádoby na zdravotnický odpad.
- Neskladujte ve vlhkém prostředí.
- Otevírací a zavírací štítek výrobku musí být po každém použití uzavřen.

## Trvanlivost:

Pokud je výrobek neotevřený a uchováván v původním obalu, jeho trvanlivost je 24 měsíců.

## Symbyly a zkratky:

| Symbol                                                                              | Význam                                | Vysvětlení a odůvodnění                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Datum výroby                          | Označuje datum výroby zdravotnického prostředku.                                                                                                                                                                                                               |
|  | Chraňte před slunečním zářením        | Chraňte před sluncem                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Uchovávejte v suchu                   | Označuje zdravotnický prostředek, který musí být chráněn před vlhkostí.                                                                                                                                                                                        |
|  | Šarže                                 | Určuje kód šarže výrobce, aby bylo možné identifikovat šarži.                                                                                                                                                                                                  |
|  | Datum expirace                        | It shows the expiration date of the medical device.                                                                                                                                                                                                            |
|  | Výrobce                               | Tento symbol je doprovázen názvem a adresou výrobce (tj. osoby uvádějící zdravotnický prostředek na trh) vedle tohoto symbolu.                                                                                                                                 |
|  | Čtěte návod k použití nebo se poraďte | Označuje, že by si uživatel měl prostudovat návod k použití. Pokud jsou návod k použití a informace pro pacienta obsaženy ve stejném elektronickém návodu k použití, může se výrobce rozhodnout použít tento symbol k označení obou.                           |
|  | Pozor                                 | Používá se k označení, že je třeba dbát opatrnosti při obsluze zařízení nebo ovládacího prvku v blízkosti místa, kde je symbol umístěn, nebo k označení, že aktuální situace vyžaduje pozornost obsluhy nebo její zásah, aby se předešlo nežádoucím následkům. |

## Barrier Cream Návod k použití

|                                                                                   |                  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Referenční číslo | Uvádí referenční číslo výrobce, aby bylo možné zdravotnický prostředek identifikovat. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Medoffice Sağlık Endüstri A.Ş.  
Yazıbaşı Mah. Kuşcu Cad. No:9 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR TURKEY  
Tel: +90 232 270 22 30 / +90 232 431 31 12  
E- mail : info@medoffice.com.tr