

Název produktu: Ochranný film ve spreji

Obchodní název: Med – Cover Barrier Film (spray)

Účel použití :

Pomáhá chránit neporušenou pokožku před dermatitidou způsobenou inkontinencí pacientů s omezenou pohyblivostí, upoutaných na lůžko a pacientů se speciálními potřebami, jako jsou pacienti na jednotce intenzivní péče.

Použití:

Aplikujte přímo na místo, na které chcete aplikovat.
Otevřete obal pomocí části „otevřít zde“ na štítku.

Indikace:

Pomáhá chránit neporušenou pokožku před dermatitidou způsobenou inkontinencí pacientů s omezenou pohyblivostí, upoutaných na lůžko a pacientů se speciálními potřebami, jako jsou pacienti na jednotce intenzivní péče.

Kontraindikace:

Produkt nemá žádné kontraindikace.

Cílová populace:

Neexistuje žádná speciální populace pacientů.

Fáze použití:

Je připraven k přímému použití bez nutnosti míchání nebo ředění s jakoukoli látkou. Otevřete obal zespodu.
Aplikujte otřením na místo, na které chcete aplikovat.

Četnost použití:

Je vhodný pro každodenní použití.

Upozornění:

- Nemíchejte s jinými produkty nebo chemikáliemi
- Používejte pouze neporušené a nepoškozené obaly.
- Nepoužívejte s látkami přecitlivělými na složky přípravku.
- K zevnímu použití.
- Nepoužívejte přípravky s poškozeným obalem.
- Nenechávejte obal přípravku otevřený.
- Nevyžaduje oplachování a sušení.
- Použité přípravky a jejich obaly by měly být zlikvidovány jako zdravotnický odpad.
- Nepoužívejte u pacientů a/nebo uživatelů se známou přecitlivělostí na materiály/složky přípravku.
- Kojenci ve věku 0–6 měsíců, kojící nebo těhotné ženy by měly přípravek používat pod dohledem lékaře.
- Nesmí přijít do kontaktu s očima.
- Nesmí přijít do kontaktu s otevřenou ranou.
- Datum expirace a číslo šarže jsou napsány jako razítkovací značka na horní straně obalu.
- Prázdné obaly použitých přípravků by měly být vyhozeny do plastových odpadkových košů.

Barrier Film (Spray) Návod k použití

- Před a po použití přípravku by neměly být používány žádné jiné čisticí tekutiny ani látky.
- Používá se zevně.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nevyžaduje oplachování a sušení.
- Použité přípravky by měly být zlikvidovány jako zdravotnický odpad.

Pokyny pro uživatele:

- Zkontrolujte obal výrobku, zda není poškozený nebo deformovaný.
- Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.
- Obal opatrně otevřete.
- Trvanlivost výrobku je stanovena na 2 roky (24 měsíců). Nepoužívejte prošlé výrobky.
- Po použití vyhoďte obal do nádoby na zdravotnický odpad.
- Neskladujte ve vlhkém prostředí.

Trvanlivost:

Pokud je výrobek neotevřený a uchováván v původním obalu, jeho trvanlivost je 24 měsíců. Bariéra Film (Sprej)
Návod Pro Použití

Symbole a zkratky:

Symbol	Význam	Vysvětlení a odůvodnění
	Nepoužívejte opakovaně.	Používá se k prohlášení, že zařízení nebylo použito dvakrát.
	Datum z výroby	Označuje datum výroby zdravotnického prostředku
	Chraňte před slunečním zářením	Chraňte před slunečním zářením
	Uchovávejte v suchu	Označuje zdravotnický prostředek, který musí být chráněn před vlhkostí.
	Šarže	Určuje kód šarže výrobce, aby bylo možné identifikovat šarži.
	Datum expirace	Zobrazuje datum spotřeby zdravotnického prostředku.
	Výrobce	Tento symbol je doprovázen názvem a adresou výrobce (tj. osoby uvádějící zdravotnický prostředek na trh) vedle tohoto symbolu.
	Čtěte návod k použití nebo se poraďte	Označuje, že by si uživatel měl prostudovat návod k použití. Pokud jsou návod k použití a informace pro pacienta obsaženy ve stejném elektronickém návodu k použití, může se výrobce rozhodnout použít tento symbol k označení obou.

Barrier Film (Spray) Návod k použití

	Pozor	Používá se k označení, že je třeba dbát opatrnosti při obsluze zařízení nebo ovládacího prvku v blízkosti místa, kde je symbol umístěn, nebo k označení, že aktuální situace vyžaduje pozornost obsluhy nebo její zásah, aby se předešlo nežádoucím následkům.
	Referenční číslo	Uvádí referenční číslo výrobce, aby bylo možné zdravotnický prostředek identifikovat.



Medoffice Sağlık Konec A.Ş.
Yazibaşı Mah. Kuşcu CAD. Ç.: 9 Yazibaşı / Torbali / İZMİR TÜRKİYE
Tel.: +90 232 270 22 30 / +90 232 431 31 12
E- posta : info@medoffice.com.tr