

NÁVOD K POUŽITÍ SHAMPOO CAP

Čepice Med-Cover je určena k mytí vlasů a pokožky hlavy pacientů na jednotkách intenzivní péče, ležících pacientů a osob s omezenou pohyblivostí. Používejte maximálně 3 minuty na hlavě.

Návod k použití:

Nejprve vyjměte čepici z obalu a nasadte si jí na hlavu. Ujistěte se, že všechny vlasy jsou uvnitř. Začněte masírovat vlasy celé hlavy a poté čepici sejměte. Po použití čepice není nutné oplachování. Po použití čepici zlikvidujte.

Upozornění a první pomoc:

Poškozené obaly se nepoužívají. Výrobek je určen k mytí a péči o vlasy a pokožku hlavy. Nedoporučuje se používat na ranách a používat jako tampon. Výrobek je jednorázový a nelze jej používat opakovaně. Před a po použití výrobku se nepoužívají žádné jiné čisticí tekutiny ani látky. Zabraňte kontaktu s očima. V případě zasažení očí omyjte velkým množstvím vody. Je vhodný pouze k vnějšímu použití. Uchovávejte mimo dosah dětí, v pokojové teplotě a nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Návod k použití v mikrovlnné troubě:

1. Vložte mycí čepici na několik sekund do mikrovlnné trouby při výkonu 700 W.
 2. Zkontrolujte teplotu a nepřekračujte 35–40 °C.
- Použití mikrovlnné trouby závisí na požadavcích.